

## Brugsvejledning, biothesiometer, genopladeligt batteri



### Vibrationsniveau

- Tryk **PIL OP** for at øge vibrationsamplituden.
- Tryk **PIL NED** for at mindske vibrationsamplituden.
- Brugeren kan vælge ethvert vibrationsniveau i området (0-25) VPT.

### Positionsvalg og Gem af Data

- Standardpositionen er **P1**, og standard-VPT for enhver position er 0. Brugeren kan gemme data for maksimalt 9 positioner pr. patient.
- For at vælge eller ændre position skal du trykke på **P/R** knappen for at åbne positions- og Rapporteringsmenuen.
- Brug **PIL OP** eller **PIL NED** knapperne til at vælge positionen, og tryk igen på **P/R** knappen for at vende tilbage til startskærmen.
- Husk, hver gang brugeren trykker på **P/R** knappen, gemmes VPT-niveauet for den tilsvarende position, der vises på skærmen.
- Hvis brugeren vender tilbage fra **Positions- og Rapporteringsmenuen** til startskærmen uden at ændre positionen, nulstilles VPT-værdien til 0 igen.

### Rapporteringsmenu

- Når undersøgelsen er afsluttet, skal brugeren trykke og holde **P/R** i 2–3 sekunder, indtil rapporteringsmenuen vises på skærmen.

*Hvis Bluetooth er aktiveret, vil data blive sendt trådløst til en softwareapplikation for at generere rapporter.*

- Rapporteringen starter fra standardpositionen **P1**, og den gemte værdi for denne position vil blive vist.
- Brug **PIL OP** eller **PIL NED** knapperne til at vælge en position og se de gemte data. I slutningen vises også den gennemsnitlige VPT. Brugeren skal gemme data for mindst 2 positioner for at kunne vise gennemsnitlig VPT.
- Hvis der trykkes **P/R** igen, returnerer systemet til startskærmen.

# Better Feet®

## **Pause og Nulstil**

- a. Disse muligheder er kun tilgængelige på startskærmen.
- b. Tryk / for at pause vibrationsstimuli, og tryk igen for at genstarte.
- c. Tryk og hold / i 2–3 sekunder for at nulstille enheden. Denne mulighed skal vælges hver gang, der registreres data for den anden fod eller en ny patient.